

# Bien ajuster son masque OCOV



**1**  
Enfiler le masque sur le visage.




**2**  
Régler la sangle du bas, puis celle du haut, de manière à ce que le masque soit maintenu plaqué contre le visage, sans trop serrer.



**3**  
Ajuster le masque sur le visage en s'assurant que le nez et le menton soient pris dans le demi-masque interne.



**4**  
Lors du retrait, éviter tout contact avec le visage et les vêtements et procéder à un lavage soigneux des mains ou friction hydroalcoolique.

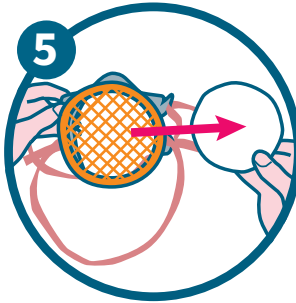

**5**  
Dévisser le capuchon, retirer le filtre et le placer dans un sachet spécifique et identifié avant désinfection. Nettoyer le masque et le filtre suivant les instructions décrites dans le mode d'emploi.